

Informatieblad Slechthorenden Systeem

Welkom in Kunstlinie! Wij vinden het belangrijk dat iedere bezoeker kan genieten van onze voorstellingen en evenementen. Daarom zijn we blij om ons nieuwe slechthorenden systeem aan te kondigen.

Met dit systeem zorgen we ervoor dat dialogen, muziek en geluidseffecten voor iedereen helder en duidelijk hoorbaar zijn, zodat je niets hoeft te missen van de voorstelling.

In dit informatieblad staat alle informatie over hoe het systeem werkt, welke apparatuur er beschikbaar is en waar je terecht kunt voor hulp. Of je nu een regelmatige bezoeker bent of voor het eerst bij ons theater komt, we staan klaar om jouw ervaring zo aangenaam mogelijk te maken.

Heb je feedback naar aanleiding van je bezoek, laat het ons dan weten! Dit kan door een evaluatieformulier in te vullen op onze site.

Ons nieuwe slechthorenden systeem bestaat uit een ontvanger (foto hieronder) met een koptelefoon. Deze ontvangers hebben buiten de zalen geen bereik en zijn alleen in de zaal te gebruiken.


Koptelefoon gebruik: Er zijn koptelefoons beschikbaar, uiteraard is het ook mogelijk een eigen koptelefoon mee te nemen.

3,5 mm Jack aansluiting: Als het gehoorapparaat een koptelefoonaansluiting heeft, kan deze aangesloten worden op de ontvanger.

Inductielus: Om gebruik te kunnen maken van de T-stand op het gehoorapparaat zijn er inductielussen beschikbaar die je kunt aansluiten op de koptelefoonaansluiting.

Instructies

- Koptelefoonaansluiting.** Plug de koptelefoon (of koppeling naar het gehoorapparaat) in de aansluiting op de ontvanger. Zorg dat de plug helemaal in de ontvanger zit om storingen te voorkomen.
- Aan/Uit en Volume.** Door de volumeknop open te draaien, gaat de ontvanger aan (de knop klikt als het apparaat inschakelt).
- Power indicator.** Als het rode lampje brandt, is de ontvanger ingeschakeld.
- Radio indicator.** Als het groene lampje brandt, heeft de ontvanger voldoende radiobereik.
- Radiobereik en geluidsniveau.** Het linker balkje geeft aan hoeveel (radio)bereik de ontvanger heeft, het rechterbalkje geeft het geluidsniveau aan.

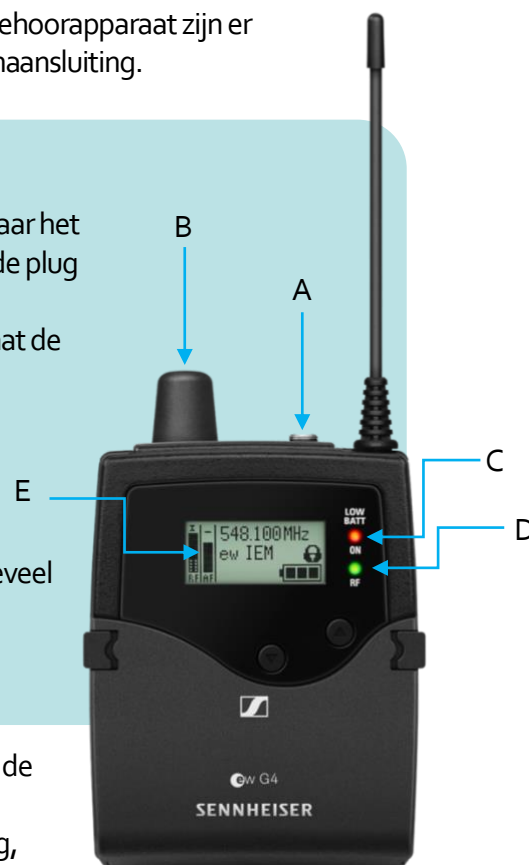

Let op: Het geluid van het systeem is zoals genoemd een kopie van de geluidsmix die naar de speakers in de zaal gaat. Dit betekent dat effecten die gebruikt worden voor de zaal, zoals galm of vervorming, ook te horen zal zijn op de koptelefoon. Hier hebben wij geen invloed op en dit kunnen wij niet aanpassen.